


1 Nylonfaden an der Backe einfädeln.  
Insert nylon thread into the endpiece.

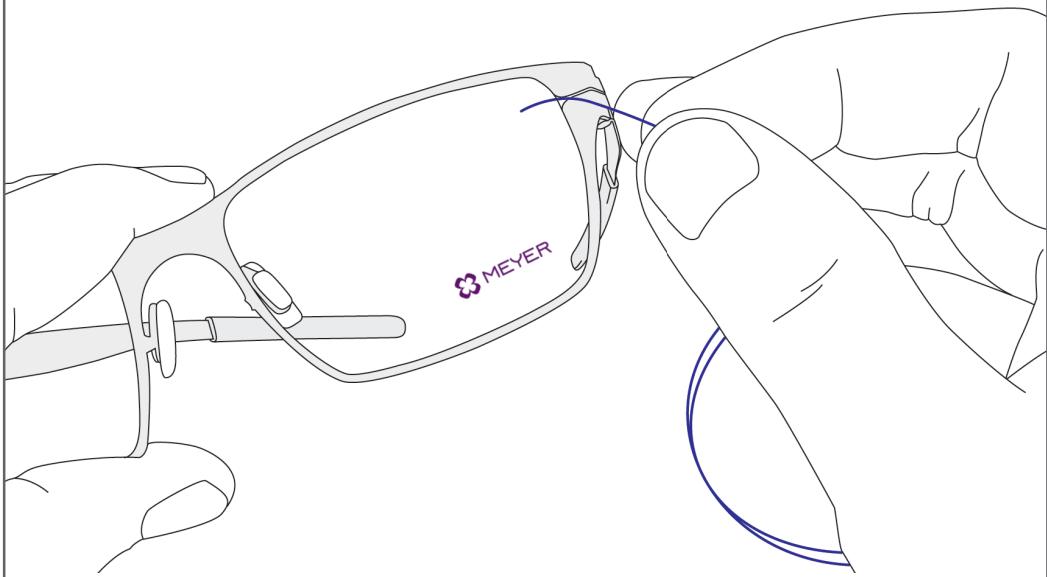


3 Glasgröße des Korrektionsglases:

Reintitan: Korrektionsglas = Stützscheibe + 0,1 mm  
Betatitan: Korrektionsglas = Stützscheibe + 0,1 mm

Size of prescription lens:  
Pure Titanium: prescription lens = demolens + 0,1 mm  
Beta-Titanium: prescription lens = demolens + 0,1 mm

Rillmaße:  
Groove measurements:

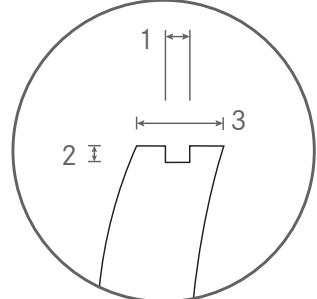


1 Nutbreite	0,8mm
2 Nut-Tiefe	Reintitan Pure Titanium 0,45 mm
3 min. Randdicke	Beta-Titan Beta-Titanium 0,4 mm
	2,0 mm minimum edge thickness


Angegebene Maße sind Endmaße. Bitte nachmessen!  
The given dimensions are final dimensions. Please measure!

5 Die Rilltiefe ist korrekt, wenn die auseinander gebrochenen Enden der gemuschelten Formlehre zusammen treffen und die Schlitzbreite parallel ist. Dabei darf das Korrektionsglas nicht wackeln.


The groove depth is correct when the separated end parts of the rim gauge meet. The slot must be parallel. In doing so the correction lens must not move!

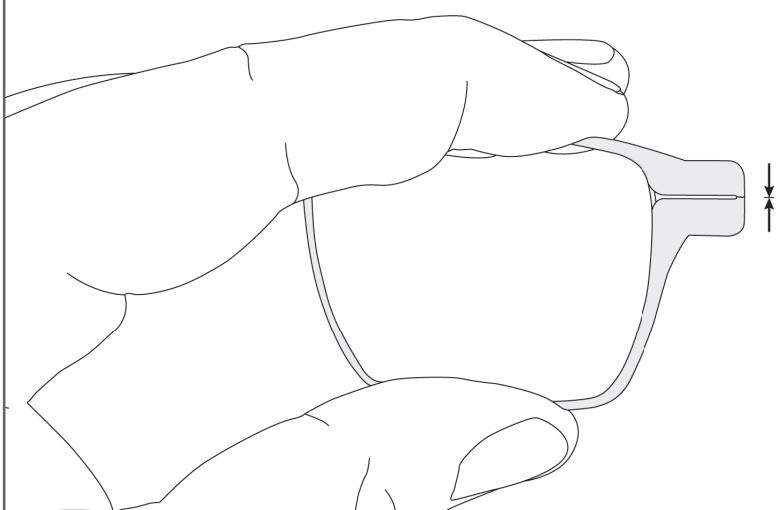

7 Den temporalen Fassungsrand in die Nut klicken.  
Click the temporal rim into the groove.

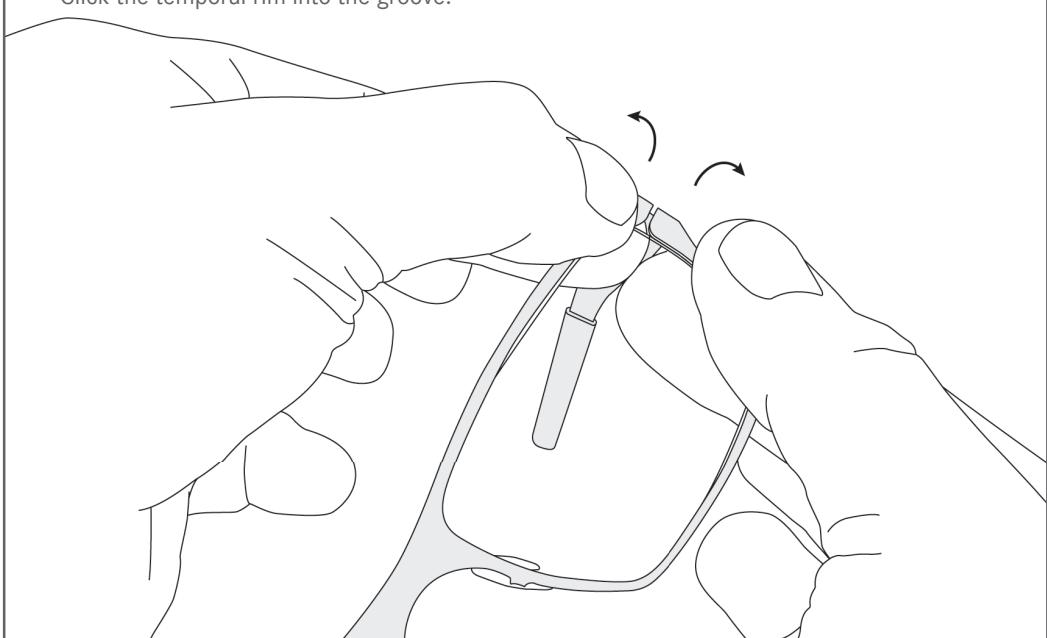


2 Nylonfaden in die untere temporale Ecke des Fassungsrandes ziehen.  
Fassungsrand dann aus der Nut nach hinten ziehen.  
Pull the nylon thread into the lower temporal corner of the rim.  
Pull back the rim off the groove.

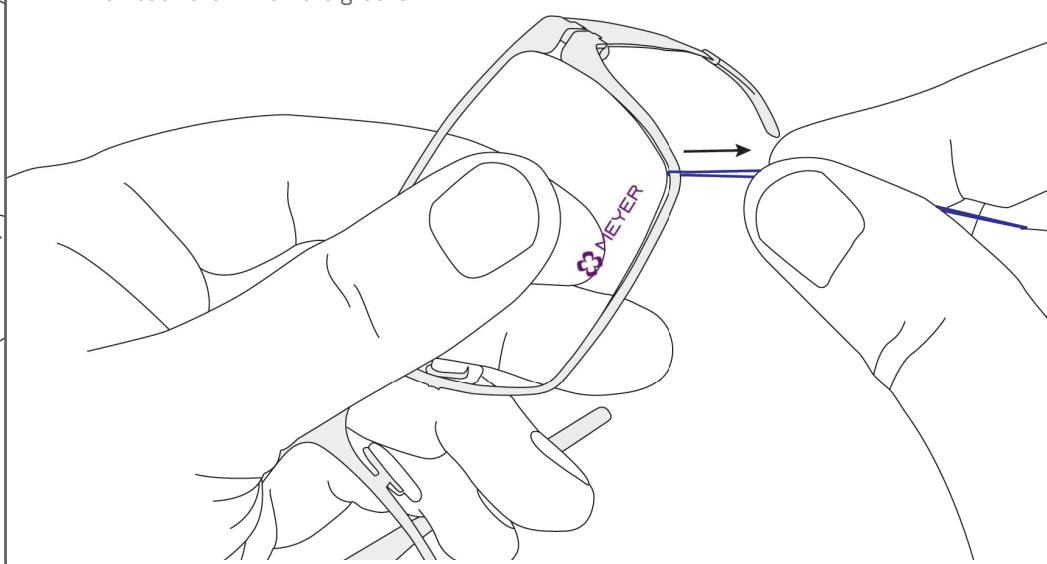


4 Die Formlehre auseinander brechen.

Break apart the rim gauge.

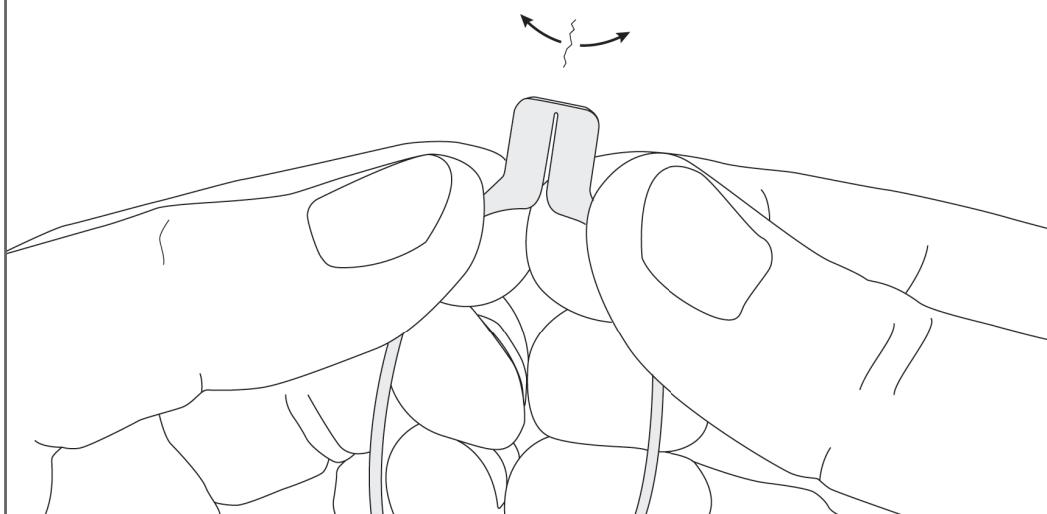


6 Das Korrektionsglas rückseitig einsetzen. Beginnen Sie am nasalen Fassungsrand.

Insert the correction lens from the back. Start at nasal rim.

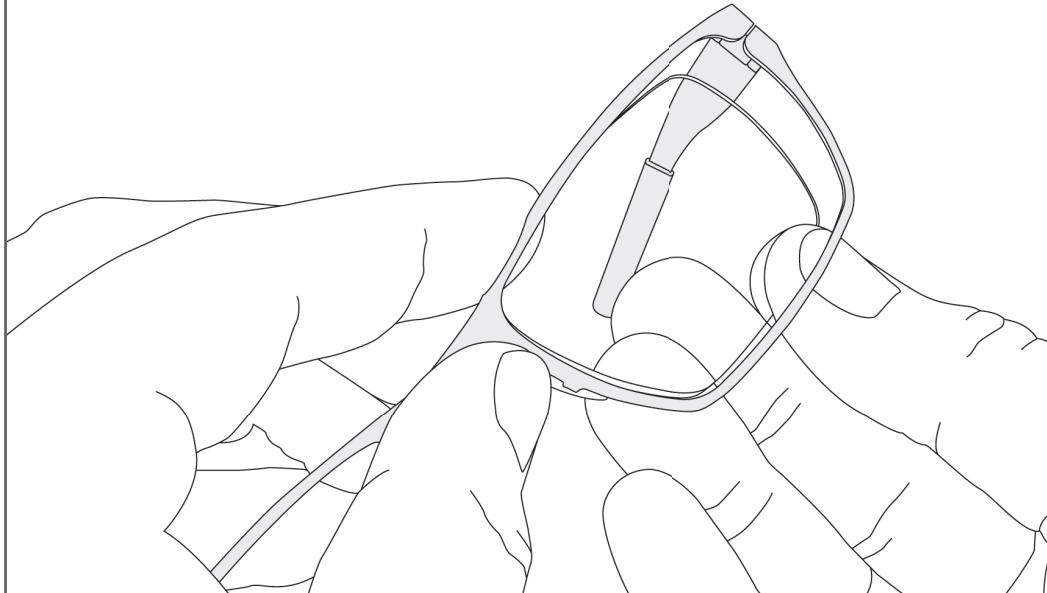

8 Biegehilfe zum Anpassen der Bügelenden als Golfbügel.  
Acetatbügelenden bitte vorher leicht erwärmen.

Use the bending tool to adjust the temple tip to a skull temple.  
In case of acetate temple tips please carefully preheat them.

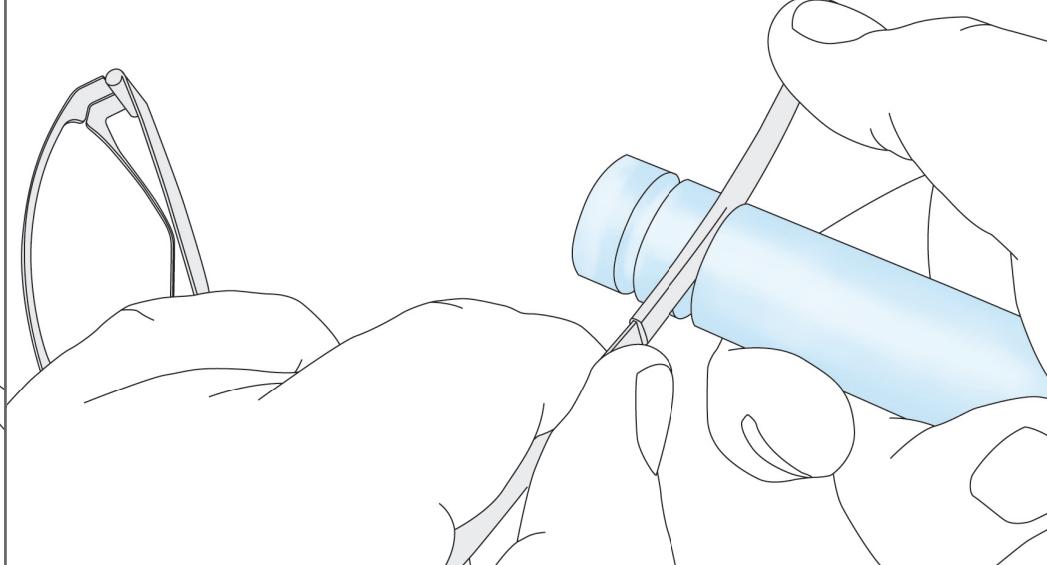

THE BEST HANDS CAN MAKE FOR YOUR EYES.

MADE IN GERMANY

05.2019

 MEYER